



Guía de uso

MyJECT™ Autoinyector



VIATRIS

CE 2797



Fabricante:

Synthon Hispania S.L.
Poligono Las Salinas
08830, Sant Boi de Llobregat
ES

Distribuido por:

Mylan Ireland Ltd,
6th Floor South Bank House
Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

374811-01_12_0010203es
915530

Índice

MyJECT™ Autoinyector	04
Advertencias importantes	06
Partes del inyector	07
1. Primeros pasos	08
2. Ajuste de profundidad y confirmación	09
3. Reajuste	10
4. Carga de la jeringa	11
5. Montaje	12
6. Extracción del capuchón de aguja	13
7. Selección del sitio de punción y administración de la dosis	14
8. Retirar y confirmar	16
9. Extraer y eliminar	17
10. Limpieza y almacenamiento	18

MyJECT™ Autoinyector

Guía de uso

Bienvenido. En esta guía te explicamos paso a paso como **utilizar tu MyJECT™ Autoinyector** de una manera **fácil y precisa**.

Es importante leer esta guía antes de administrarte la primera inyección, incluso si previamente se ha utilizado un autoinyector similar a este.



Aguja invisible,
incluso **después de**
la inyección



Ajuste de profundidad
de la aguja adecuada a
cada paciente



Confirmación clara
de la correcta
administración de
la dosis


Instrucciones de Uso

El **MyJECT™ Autoinyector** es un dispositivo de inyección automático reutilizable para ser utilizado con una jeringa precargada de vidrio de 1,0 ml, siguiendo la recomendación de su profesional sanitario.

Una vez instalado y montado, el autoinyector permite que el usuario se administre una única inyección subcutánea.

Se recomienda sustituir el autoinyector transcurridos un año tras su primer uso.

NOTA: Si en algún punto durante el uso de este dispositivo, este no suministra la dosis completa, póngase en contacto con su médico y/o consulte la guía de medicación para obtener instrucciones sobre cómo efectuar una inyección manual.

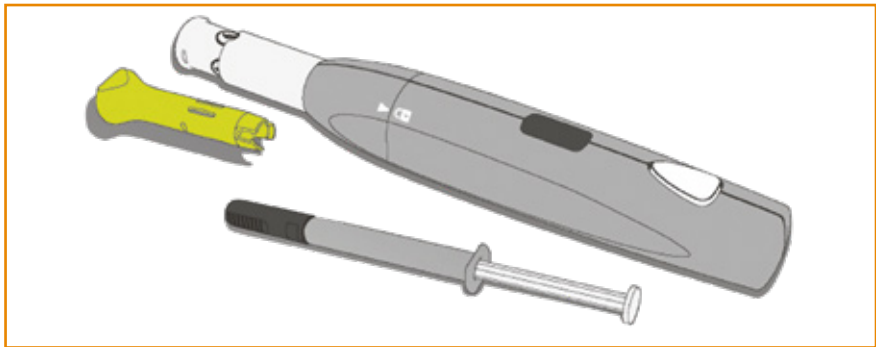

Advertencias importantes



ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños.

NO comparta este autoinyectable con otras personas.

El uso del autoinyector sin ninguna jeringa, con una jeringa vacía o con una jeringa utilizada podría dañar el autoinyector.




Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con su médico o llame al:

+34 900 102 712


NOTA: MyJECT™ Autoinyector es para usar con una jeringa de vidrio de 1 ml con una aguja fina de 1,27 cm y un capuchón de la aguja.

Para información adicional y aprender a usar la jeringa de cristal precargada, consulte el prospecto de Acetato de Glatiramero Mylan 20 y 40 mg/ml solución inyectable en jeringa precargada.

Partes del inyector

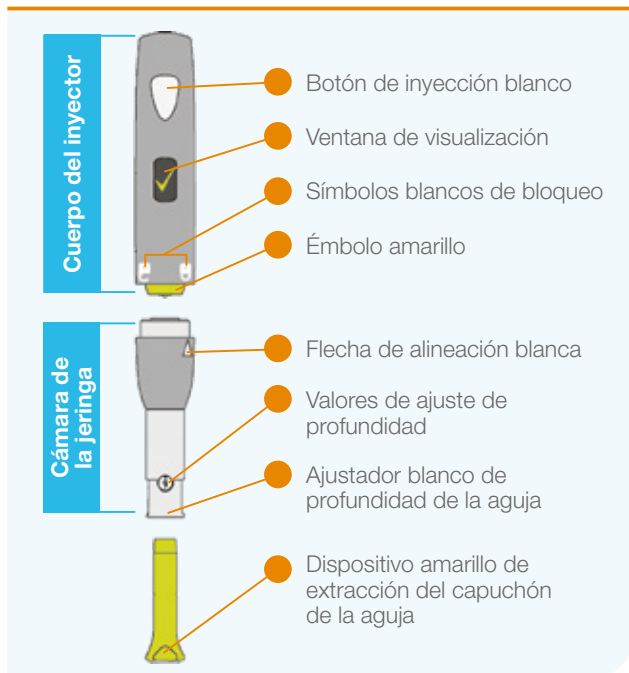

Partes de la jeringa precargada

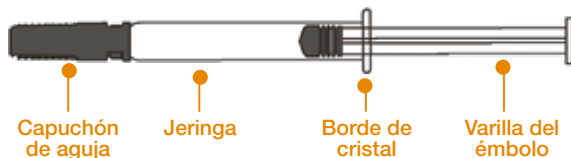

NOTA:

La jeringa de cristal precargada de 1,0 ml no se suministra con el **MyJECT™ Autoinyector**

1

Primeros pasos


1A | Extraer del embalaje y reunir los componentes

Reúna los siguientes componentes:

- <Autoinyector> reutilizable

Componentes adicionales no incluidos con el dispositivo:


- **Jeringa precargada de 1,0 ml**
(Deje que la jeringa alcance la temperatura ambiente en caso que así se indique en el Prospecto)
- **Contenedor** para objetos punzantes
- **Paño** húmedo limpio

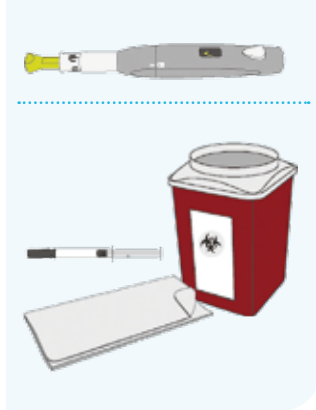

1B | Desmontar el autoinyector

Gire la cámara de la jeringa de manera que la **flecha de alineación blanca apunte hacia el símbolo de bloqueo abierto**.

Retire la cámara de la jeringa del cuerpo del inyector.

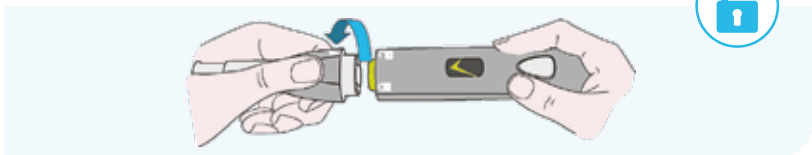


2

Ajuste de profundidad y confirmación

Ajustar la profundidad de la aguja

Compruebe que el **dispositivo amarillo de extracción del capuchón de la aguja** esté **totalmente insertado**.

A continuación, **gire el ajustador blanco de profundidad de la aguja** de manera que la **flecha gris apunte hacia el ajuste de profundidad que desee** (4, 6, 8 o 10).

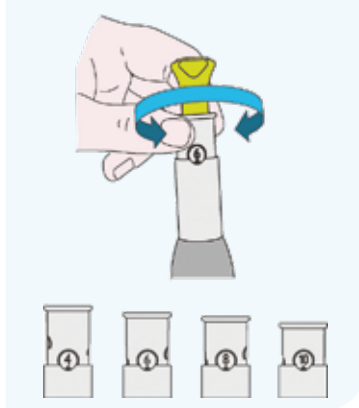

NOTA: Consulte con su médico para determinar el ajuste de profundidad de la aguja adecuado para usted. Los números más bajos de profundidad de aguja (4,6) provocan una inyección más superficial y unos números más altos (8,10) provocan una inyección más profunda.

3

Reajuste

Reajustar el autoinyector

Coloque el extremo del **dispositivo amarillo de extracción del capuchón de la cámara de la jeringa** hacia el extremo del émbolo amarillo del cuerpo del inyector.


Inserte la cámara de la jeringa en el cuerpo del inyector hasta que oiga un **“CLICK”**.

El autoinyector está **bien encajado** cuando:

- El **botón blanco** de inyección sobresale **hacia fuera**



- La **mitad** de la **ventana de visualización** es de color **amarillo**.

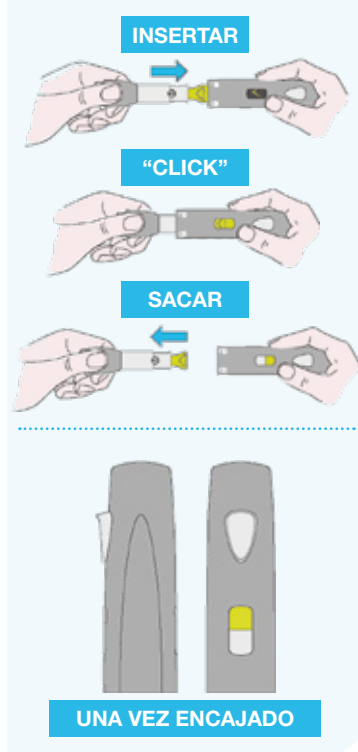

4



Carga de la jeringa

Insertar la jeringa

Apriete firmemente la cámara de la jeringa hacia abajo contra una mesa o superficie plana con el lado del dispositivo amarillo de extracción del capuchón hacia abajo.

Inserte el extremo del capuchón de aguja de la jeringa precargada en la cámara de la jeringa hasta que quede **completamente insertado**.

Inserte firmemente la jeringa en la cámara, sujetando el **émbolo** justo por encima del **borde de vidrio** y presionando hacia abajo, hasta que el borde de vidrio toque el **anillo blanco** de plástico de la cámara.

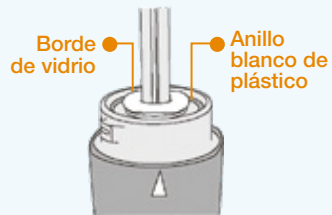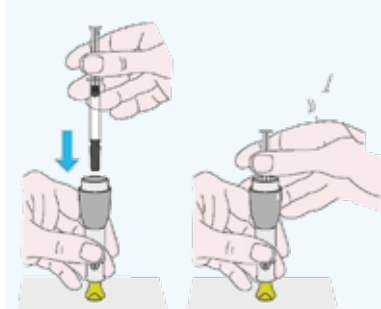

NO extraiga el capuchón de aguja de la jeringa.
NO lo utilice si la jeringa está dañada o rota.


5

Montaje

Montar el autoinyector

Para **conectar la cámara de la jeringa y el cuerpo del inyector**: sostenga la cámara de la jeringa de manera que **la flecha de alineación blanca apunte** hacia el símbolo de **bloqueo abierto**.

Seguidamente **junte las dos partes** hasta que se unan y gire hasta que la **flecha de alineación blanca apunte** hacia el símbolo de **bloqueo cerrado** y oiga un **“CLICK”**.

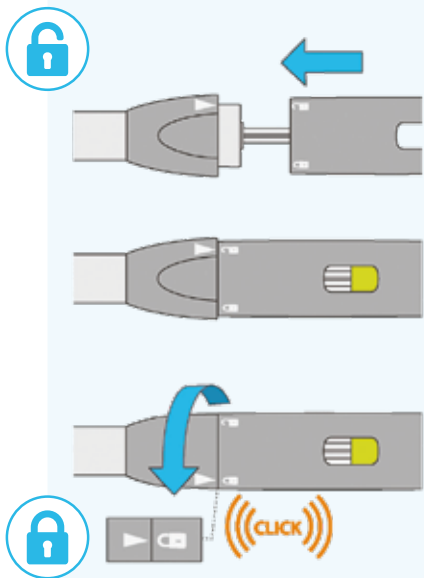

6

Extracción del capuchón de aguja

Extraiga el dispositivo amarillo para la extracción del capuchón

Quite el dispositivo amarillo de extracción del capuchón de la aguja del autoinyector para así **sacar el capuchón de aguja de la jeringa.**


Luego dé la vuelta al dispositivo amarillo de extracción del capuchón de aguja para **dejar que el capuchón de aguja caiga.**

Deshágase del capuchón de aguja de la jeringa

NOTA: Si no extrae el capuchón de aguja, deberá repetir los pasos de 4 a 6 con una nueva jeringa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

En caso de que el capuchón de aguja se quede encallado en el dispositivo amarillo de extracción del capuchón de aguja, presione sobre el capuchón de aguja hasta que caiga por el otro extremo.

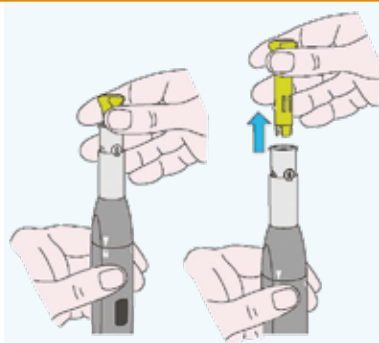

IMPORTANTE:

Guarde el dispositivo amarillo de extracción del capuchón de aguja



7

Selección del sitio de punción y administración de la dosis


7A | Seleccione y limpie la zona de punción

Para más información sobre las zonas de punción permitidas y la limpieza de la zona de punción, consulte el **Prospecto que se suministra con el medicamento**.

7B | Coloque el autoinyector contra la piel

Presione el extremo blanco abierto del autoinyector directamente hacia abajo contra la zona de punción **hasta que deje de ver el número de ajuste de profundidad** que ha seleccionado en la aguja.


Esto desbloqueará el cierre de seguridad y le permitirá pulsar el botón de inyección.

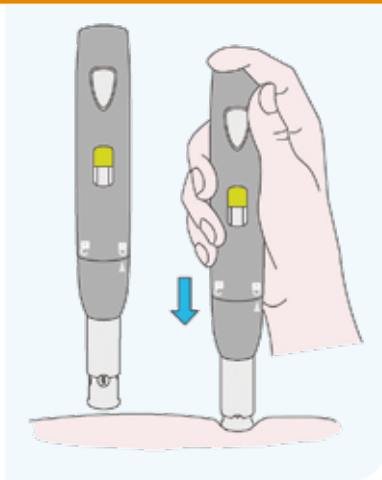


7C | Accione el autoinyector para administrar la dosis

Mientras sujeta el autoinyector hacia abajo y de forma constante, **pulse el botón de inyección de color blanco**. Oirá el **primer “CLICK”** cuando se inicie la punción.

Siga sujetando el dispositivo hacia abajo hasta que oiga el **segundo “CLICK”** y vea la **marca de verificación amarilla en la ventana de visualización**.

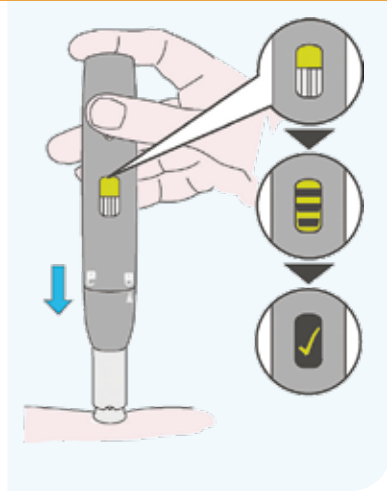

NO retire el autoinyector antes de tiempo

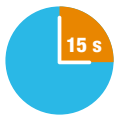


15 s

NOTA: Si no ha oído el segundo click o no puede ver la ventana de visualización, espere como mínimo 15 segundos después de haber iniciado la inyección antes de retirar el dispositivo de la zona de punción.

8 Retirar y confirmar

8A Retire el dispositivo de la zona de punción

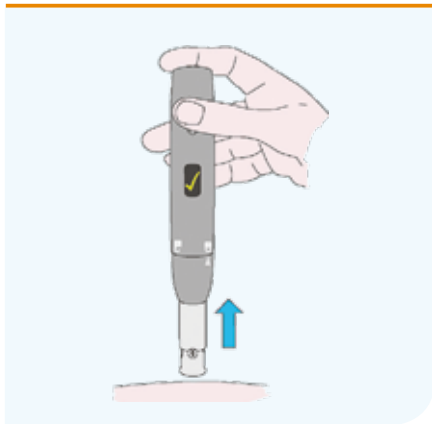

8B Compruebe que se haya suministrado toda la dosis


Si se ha administrado la dosis completa, verá una **marca de verificación de color amarillo** en la ventana de visualización.



PRECAUCIÓN:

Si usted cree que no se ha administrado la dosis completa o ve que hay restos de medicamento en la jeringa, póngase inmediatamente en contacto con su médico.

NO intente realizar una segunda punción con el autoinyector.

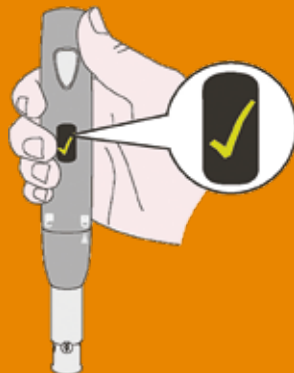

9

Extraer y eliminar

Extraiga y elimine la jeringa


Sostenga el autoinyector en posición vertical con el extremo de la aguja apuntando hacia abajo.

Gire la cámara de la jeringa de manera que la flecha de alineación blanca apunte hacia el símbolo de **bloqueo abierto**.

Retire la cámara de la jeringa del cuerpo del inyector.

A continuación, gire la cámara de la jeringa de manera que **la jeringa usada caiga en el contenedor de objetos punzantes**.

Utilice siempre un contenedor para objetos punzantes para tirar las agujas usadas.

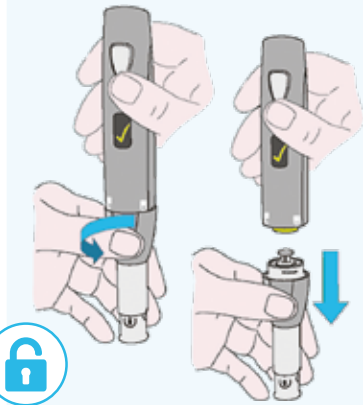

NO tire las agujas usadas a la basura.



10


Limpieza y almacenamiento

10A | Limpieza del autoinyector con un paño húmedo

Tras cada inyección, utilice un paño húmedo y limpio para limpiar las partes exteriores del autoinyector y el interior de la cámara de la jeringa.




NO sumerja el autoinyector en agua ni lo limpie con detergentes, disolventes o alcohol, ya que podrían dañar el autoinyector.

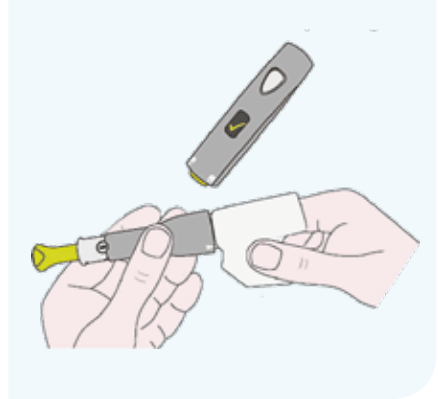

10B | Almacenamiento


Monte el inyector y guárdelo:

- A temperatura ambiente
- En un lugar limpio y seco
- Alejado de la luz solar directa

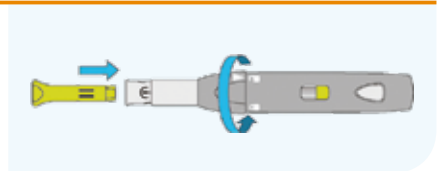

NO guarde el autoinyector en la nevera.
NO guarde jeringas dentro del autoinyector.

Este producto cumple la Directiva sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE

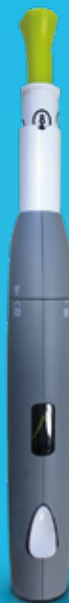

MyJECT™ Autoinyector

Viatriis es una empresa:

- que ha adquirido un sólido **compromiso**
- con la decisión de apoyar el **acceso** y mantener la **sostenibilidad** en la atención sanitaria

GA-2021-0119



VIATRIS